

Inhalt des Testkits




Tupfer




Testkassette



Extraktionsreagenz

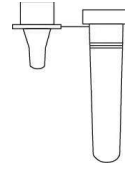

Röhrchen

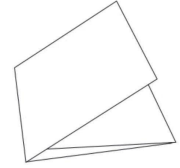

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung des Tests


- Vergewissern Sie sich, dass alle Testkomponenten Raumtemperatur haben (15–30 °C).
- Uhr, Timer oder Stoppuhr müssen in Reichweite sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Verpackungen unversehrt sind. Verwenden Sie den Test nicht, wenn die Folienverpackung sichtbar beschädigt ist.
- Öffnen Sie die Folienverpackung erst, wenn Sie bereit sind, den Test durchzuführen. Verwenden Sie die Testkassette innerhalb einer Stunde nach dem Öffnen.
- Waschen Sie sich die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich ab.

Test-Vorbereitungen

1. Röhrchen in die Schachtel einsetzen

1a


Drücken Sie das Loch auf der Schachtel ein und setzen Sie das Röhrchen in das Loch.

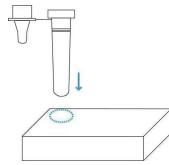

2. Extraktionsreagenz in das Röhrchen geben


2a

Drehen Sie den Verschluss des Extraktionsreagenzes ab.

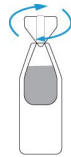

2b


Geben Sie das gesamte Extraktionsreagenz in das Röhrchen.

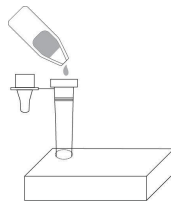

3. Tupfer öffnen

3a

Öffnen Sie die Tupferverpackung am Stäbchenende.

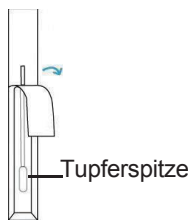


Tupferspitze

Hinweis: Berühren Sie die Tupferspitze nicht mit den Fingern.

3b

Entnehmen Sie den Tupfer.

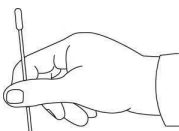


Beispielsammlung

4. Abstrich linkes Nasenloch


4a

Führen Sie die gesamte Tupferspitze vorsichtig etwa **2,5 cm** in das linke Nasenloch ein.

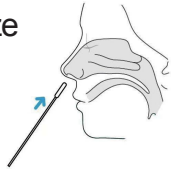

4b

Streichen Sie in einer kreisförmigen Bewegung mindestens 5-mal fest gegen die Innenseiten des linken Nasenloches.

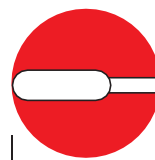


2,5 cm

(Ungefähr 1,5-fache Länge der Tupferspitze)

5. Abstrich rechtes Nasenloch


5a

Nehmen Sie den Tupfer heraus und führen Sie ihn in das rechte Nasenloch etwa **2,5 cm** hinein.

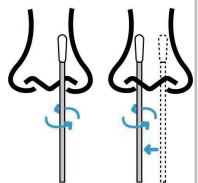

5b

Streichen Sie in einer kreisförmigen Bewegung mindestens 5-mal fest gegen die Innenseiten des rechten Nasenloches.

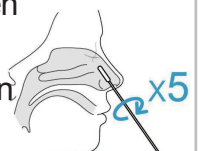


Prüfen:

Sie sollten beide Nasenlöcher abwischen.

Probenextraktion


6. Tupfer in das Röhrchen einführen

- 6a** Führen Sie den Nasentupfer in das Röhrchen mit dem Extraktionsreagenz ein.

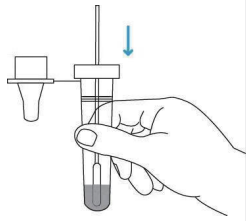

7. Tupfer 5-mal drehen

- 7a** Drehen Sie den Tupfer mindestens 5-mal und drücken Sie dabei die Tupferspitze gegen den Boden und die Seite des Röhrchens.

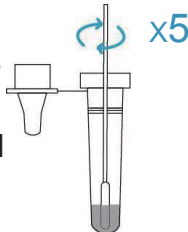


- 7b** Lassen Sie den Tupfer 1 Minute lang im Extraktionsreagenz ruhen.




8. Tupfer entnehmen

- 8a** Nehmen Sie den Tupfer heraus und drücken Sie dabei die Seiter des Röhrchens zusammen, um die Flüssigkeit aus dem Tupfer zu gewinnen.

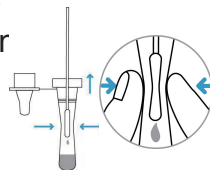



- 8b** Verschließen Sie das Röhrchen gut mit der dazugehörigen Tropfkappe und setzen Sie es wieder in die Schachtel.

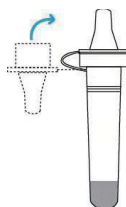

Test durchführen

9. Testkassette öffnen


- 9a** Öffnen Sie den versiegelten Beutel und nehmen Sie die Testkassette heraus.

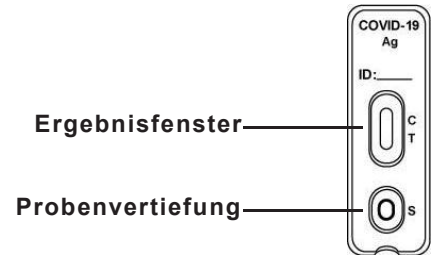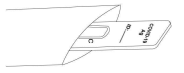

Hinweis: Die Testkassette muss während des gesamten Tests **FLACH** auf dem Tisch liegen.

10. Probe in Probenvertiefung geben

- 10a** Halten Sie das Röhrchen genau senkrecht über die Probenvertiefung.

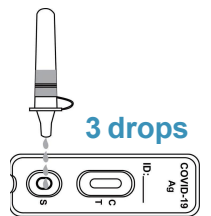

- 10b** Geben Sie **3 Tropfen (drops)** in die Probenvertiefung, indem Sie die Seiten des Röhrchens leicht zusammendrücken.

Hinweis 1: Bei Verwendung von weniger als 3 Tropfen Probe können falsch negative Ergebnisse auftreten.

Hinweis 2: Wenn die farbige Linie im Kontrollbereich (C) erscheint, können 1–2 weitere Tropfen der Probe zugegeben werden. Das Ergebnis wird dadurch nicht beeinflusst.

Ergebnis lesen



11. Zeitmessung

Starten Sie die Uhr/Stopuhr oder den Timer.

12. 15 Minuten warten

Lesen Sie das Testergebnis nach 15–20 Minuten ab; nach mehr als 20 Minuten darf es **NICHT** mehr abgelesen werden.


Hinweis: Wenn die Testergebnisse nach weniger als 15 Minuten oder mehr als 20 Minuten abgelesen werden, können falsche Ergebnisse auftreten.

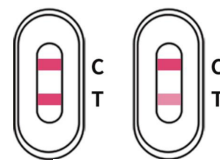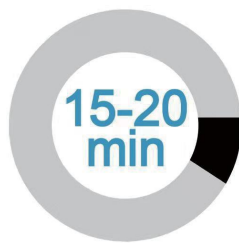

Positives Ergebnis



Negatives Ergebnis

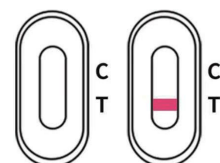

Ungültiges Ergebnis